

LC-TITANBAND

Low-Contact-Titanband mit Schnalle



Set LC-Titanband

LC-Titanband mit Schnalle		
7.440.01	8.0 mm x 0.4 mm; Länge 260 mm	4

Instrumente		
10.271.11/65	Bandumführungsinstrument; 1/4"-Kupplung; gerade; Ø 65mm; L 225mm	1
10.271.12/65	Bandumführungsinstrument; 1/4"-Kupplung; schräg; Ø 65mm; L 185mm	1
10.271.11/45	Bandumführungsinstrument; 1/4"-Kupplung; gerade; Ø 45mm; L 205mm	1
10.271.12/45	Bandumführungsinstrument; 1/4"-Kupplung; schräg; Ø 45mm; L 175mm	1
10.307.03	Griffstück mit 1/4"-Kupplung; Ln 162	1
10.271.20	Universalspanngerät f. Bänder bis 8mm x 0.4mm/Seile bis Ø2mm; L220mm	1
10.271.03	Stößel f. LC-Titanband 8.0mmx0.4mm; 1/4"-Kupplung; L 125mm	1
10.271.05	Kraftschneider für LC-Titanband 8.0mmx0.4mm; L 260mm	1
2.975.03	Hammer aus Metall; 300 g schwer	1

Siebkorb		
19.519.10	Siebkorb m. Einsatz f. Instrumente Titanband	1



SetNr. 19.519.00
2 Ebenen-Ansicht



Alle Vorteile auf einen Blick

- geringe Osseointegration durch gleichmäßig verteilte Druckspannungen auf den Knochen (im Vergleich zu Seilen und Drähten)
- Noppen auf der „knochenzugewandten“ Seite verhindern das Verrutschen des Bandes und verringern zusätzlich die Osseointegration
- hohe Bruchfestigkeit
- Metallentfernung deutlich einfacher im Vergleich zu Seilen oder Drähten
- Band ist nachspannbar
- universeller Einsatz an Femur und Humerus
- wie anhand umfangreicher Untersuchungen nachgewiesen, kommt es zu keiner Störung der periostalen Durchblutung

Indikationen und Kontraindikationen

Indikationen

- Revisionsendoprothetik des Femurs bzw. des Humerus
- Periprothetische Frakturen des Femurs bzw. des Humerus
- Ermüdungsbrüche des Femurs bzw. des Humerus
- Osteoporotische Frakturen des Femurs bzw. des Humerus

Kontraindikationen

- Gelockerte Prothesen Typ Vancouver B 2 stellen eine Kontraindikation zur alleinigen Anwendung des LC-Titanbandes dar, hier ist in jedem Fall ein zusätzlicher Wechsel des Prothesenschaftes erforderlich.
- große Weichteilschäden im Bereich des OP-Feldes
- Entzündungen im Bereich des OP-Feldes
- schlechte Patientencompliance


Zielgruppe

- Die Versorgung mit dem LC-Titanband erfolgt bei ausgewachsenen Patienten.


Eigenschaften

- die dem Knochen zugewandte Seite besitzt auf 70 mm Länge eine genoppte Struktur
- ansonsten vollständig glatte Oberfläche
- an einem Ende befindet sich eine Aussparung zum Einhaken des Bandes in das Umföhrungsinstrument
- am gegenläufigen Ende ist die Schnalle zum Fixieren des Bandes


Implantation des Bandes

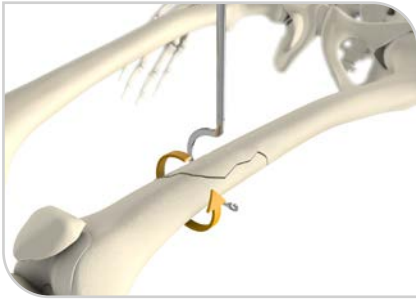


Umfahren

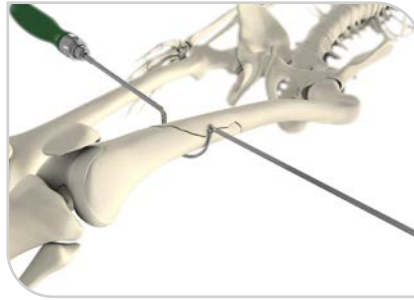


Band einhaken

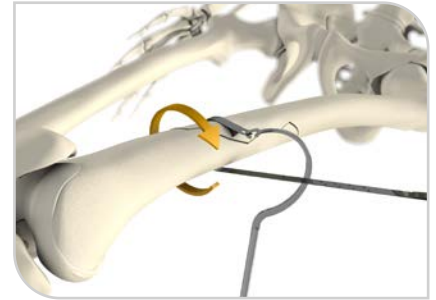


Band durchziehen

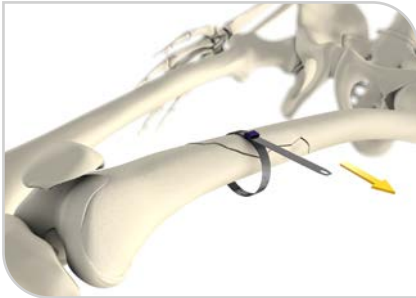


Band durchschieben

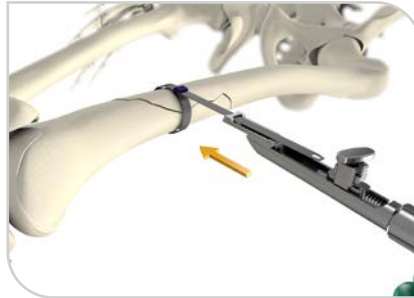


Band einziehen

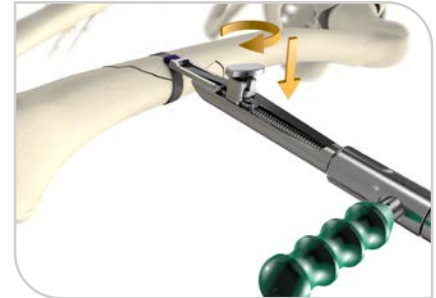

Band einspannen

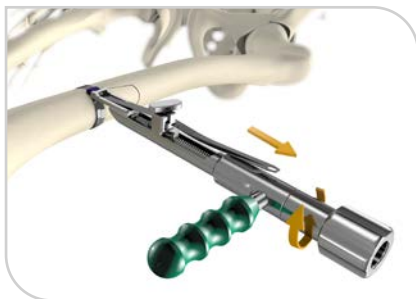

Band spannen

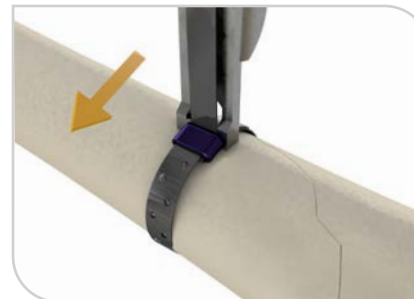

Band knicken



Band kürzen



Befestigtes Band

Ihr Kontakt zu uns



Königsee Implantate GmbH

OT Aschau | Am Sand 4
07426 Allendorf/Thüringen
Deutschland

Fon: + 49 36738 498 - 550
Fax: + 49 36738 498 - 89 550

bestellung@koenigsee-implantate.de
www.koenigsee-implantate.de

Dieses Dokument ersetzt weder eine OP-Anleitung noch eine fachliche Einweisung zur Anwendung des Produktes. Ausführliche Informationen finden Sie unter <https://ksi.online-ifu.com>

CE 0197

LC-Titanband

Low-Contact-Titanband mit Schnalle

AnSp | Edition 03 | 2019-06